

Be Brilliant™

Produktübersicht Oktober 2022



signia



Inhalt

Signia Augmented Xperience	4
Stylotto AX	8
Insio Charge&Go AX	10
Pure Charge&Go AX	12
Pure Charge&Go T AX	13
Pure 312 AX	14
Signia Xperience	16
Signia Active	18
Silk X	19
Motion Charge&Go X	20
Motion Charge&Go P X	21
Motion Charge&Go SP X	22
Pure 312 X	23
Signia Nx	24
Insio Nx	26
Motion 13 Nx	27
Signia Basissegment	28
Intuis 3 RIC 312	30
Intuis 3 HdOs	31
Farbübersicht	32
Funktionsübersicht	34
Zubehör	40
Charger Kompatibilitäten	42
Signia App	44
Signia Assistant	45
Mein Wohlbefinden	46
EarWear 3.0	48
ThinTubes, miniReceiver 2.0, Details EarWear 3.0	50
Unity 3	52
iScan II	54
Programmiergeräte	55
Reinigungs- und Pflegemittel	55
Service für HörakusterInnen	56

Signia Augmented Xperience

AX – der neue Standard


Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Mit der AX Chip -Plattform haben wir erstmals die Voraussetzungen geschaffen, neue Funktionalitäten in bereits eingeführte Produkte zu implementieren. Nun stellen wir ein zweites AX Upgrade für die Leistungsklassen 7AX bis 3AX zur Verfügung. Dessen Vorteile sind vielfältig: HörgeräteträgerInnen, die ihre Hörgeräte mit der Signia App steuern, können nun unter Mein Wohlbefinden ihr Nutzungsverhalten einsehen. Nutzertests zeigen, dass die Messung von Gesundheitsfunktionen das Engagement fördert, Hörgeräte konsequent zu tragen und vielseitig zu nutzen.

Die Hands-free Funktion für iOS-NutzerInnen macht den nächsten Schritt. Telefonate anzunehmen und zu beenden, ist nun direkt am AX Hörgerät möglich.

Auch der Signia Assistant wurde weiterentwickelt. HörgeräteträgerInnen erhalten 24/7-Support nun auch beim Streaming-Klang in den drei Kategorien Audio, TV und Hands-free.

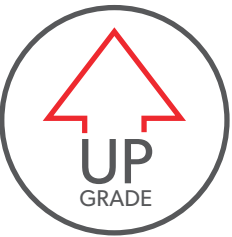

Augmented Xperience

Das nächste Upgrade für AX Hörgeräte: Ob neu oder bereits angepasst, ein Firmware-Update in Connexx und ein Update der Signia App genügen für den Aktivitätstracker Mein Wohlbefinden. Verfügbar in den Leistungsklassen 7AX bis 3AX.

SLIM-RIC



Styletto AX

RIC



Pure Charge&Go AX



Pure Charge&Go T AX



Pure 312 AX

IdO



Insio Charge&Go AX

CROS



CROS Styletto AX



CROS Pure Charge&Go AX



CROS Pure 312 AX



Augmented Xperience Funktionen

Die Schlüsseltechnologie hinter Augmented Xperience steckt im AX Chip. Die Kombination von innovativer 2-Wege-Signalverarbeitung und intelligenter Aussteuerung über Dynamic Soundscape Processing 2.0 sowie weitere intelligente Funktionen per Firmware-Update eröffnen völlig neue Möglichkeiten.

Funktionen	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Dynamic Soundscape Processing 2.0	Auf Basis von Augmented Xperience bietet Dynamic Soundscape Processing 2.0 herausragende Kontraste in der akustischen Welt der HörgeräteträgerInnen.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
Akustische Sensoren	Die akustischen Sensoren erfassen vielfältige Aspekte des Umgebungsschalls und bieten damit genaue Informationen über die Hörumgebung der HörgeräteträgerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	e2e wireless 4.0 erzielt eine wesentlich höhere Geschwindigkeit der Datenübertragung für binaurale Signalverarbeitung, wodurch Augmented Xperience ermöglicht und binaurale Funktionen, wie wireless CROS, noch besser unterstützt werden.	✓	✓	✓	✓	✓
Bewegungssensoren	Ein integrierter Bewegungssensor erkennt, ob HörgeräteträgerInnen gehen, laufen oder sich nicht bewegen. Diese Informationen werden für die Verarbeitung dynamischer Hörsituationen verwendet.	✓	✓	✓		
OVP 2.0 (Own Voice Processing 2.0¹)	AX Upgrade: Die neueste Generation OVP 2.0 nutzt die 2-Wege-Signalverarbeitung der AX Chip-Plattform. Die eigene Stimme der TrägerInnen wird präziser verarbeitet, die Umgebung klarer.	✓	✓	✓		
Signalverarbeitung	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle pro Prozessor für frontale und Umgebungseingänge	48/20	32/16	24/12	16/8	16/8
Hörprogramme	In Connexx einstellbare Hörprogramme	6	6	6	4	4
Erweiterte Eingangsdynamik	117 dB 24-Bit-Verarbeitung für verbesserte digitale Kodierung von leisen und lauten Eingängen	✓	✓	✓	✓	✓
Sprach- und Störgeräuschmanagement	Reduziert die Höranstrengung in geräuschvoller Umgebung	✓	✓	✓	✓	✓
SoundSmoothing™	Reduziert impulshafte Störgeräusche wie Geschirrklopfen und Zeitungsrascheln	✓	✓	✓	✓	
Rückkopplungs-auslöschung	In Hochgeschwindigkeit: Überwachung und Auslöschung von Rückkopplungen in den einzelnen Verarbeitungskanälen	✓	✓	✓	✓	✓
HD Musik	Voreingestellte Programme für den Genuss von nicht gestreamter Musik	3	3	1	1	
eWindScreen	Reduziert Windgeräusche effektiv	✓	✓	✓	✓	
Erweiterte Bandbreite	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen	✓				
Auto EchoShield	AX Upgrade: Nutzt die 2-Wege-Signalverarbeitung und reduziert im Universalprogramm von 7AX automatisch die Auswirkungen von Nachhall und plötzlichen lauten Geräuschen in halligen Umgebungen. In Leistungsklasse 5AX steht EchoShield im Programm „Halliger Raum“ in gewohnter Ausführung zur Verfügung.	✓	✓²			
Binaurale Direktionalität	Sorgt wissenschaftlich erwiesen für verbessertes Sprachverstehen in lautem Störgeräusch. Erhältlich für binaurale Versorgungen mit Richtmikrofonen und e2e wireless	✓	✓	✓		
Wireless CROS/BiCROS	Anpassungen mit CROS Pure Charge&Go AX ab sofort in den Leistungsklassen 7AX bis 1AX	✓	✓	✓	✓	✓
Frequenzkompression	Komprimiert den Hochtonbereich, der aufgrund einer hochgradigen Hörminderung nicht mehr von den HörgeräteträgerInnen wahrgenommen werden kann, in einen tieferen, von TrägerInnen hörbaren Frequenzbereich	✓	✓	✓	✓	✓
SpeechFocus 360	Die Mikrofone richten sich direktional nach vorne, links, rechts oder nach hinten aus, abhängig von der Richtung der dominanten Sprachquelle. Verfügbar in binauralen Anpassungen mit zwei Richtmikrofonen pro Gerät und e2e wireless	✓³	✓⁴			

Funktionen	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Mein Wohlbefinden	AX Upgrade: Zeigt HörgeräteträgerInnen über die App Interessantes zu ihrem Nutzungsverhalten und motiviert, die Hörgeräte dauerhaft zu tragen.	✓	✓	✓		
Signia Assistant	Der Signia Assistant ist die perfekte Ergänzung zur persönlichen Betreuung Ihrer KundInnen. Individuelle Klangeinstellungen können rund um die Uhr vorgenommen werden, sodass der Anpasserfolg noch schneller erreicht wird. AX Upgrade: Korrektur der drei Streaming-Kanäle Audio, TV und Hands-free.	✓	✓	✓	✓	✓
Signia App (iOS und Android)	Eine Smartphone-App für alle Hörgeräte: Die Signia App stellt sich auf das jeweilige Hörgerätemodell ein. Nur die vorhandenen Funktionen werden angezeigt.	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptive Streaming-Lautstärke	Die Streaming-Lautstärke wird automatisch und blitzschnell an wechselnde Umgebungspegel angepasst, sodass das Streaming-Signal selbst bei starkem Umgebungslärm stets rausgehört wird.	✓	✓	✓	✓	✓
Richtung/Fokus individuell	Über die Signia App können die HörgeräteträgerInnen selbst die Richtung und den Winkel des Mikrofonfokus bestimmen.	✓	✓			
Direct-Streaming iOS	Apple-Geräte streamen Telefonate und Audiosignale direkt in Bluetooth-fähige Augmented Xperience Hörgeräte – ohne zusätzliches Zubehör. AX Upgrade: Hands-free-Funktion ermöglicht freihändiges Telefonieren mit hoher Sprachqualität. Ab sofort mit CallControl: Annehmen und Beenden von Anrufen direkt am Hörgerät.	✓	✓	✓		
Direct-Streaming Android	ASHA-fähige Android-Geräte streamen Telefonate und Audiosignale direkt in Bluetooth-fähige Augmented Xperience Hörgeräte – ohne zusätzliches Zubehör.	✓	✓	✓	✓	✓
StreamLine TV	Dieser Sender überträgt den TV-Ton in Dolby Digital direkt in Bluetooth-fähige Signia Hörgeräte. Die Kopplung erfolgt vollautomatisch, indem die Hörgeräte auf den Sender gelegt werden.	✓	✓	✓	✓	✓
StreamLine Mic	StreamLine Mic ermöglicht hands-free Audio-Streaming von Telefonanrufen und Musik über jedes Bluetooth-Smartphone, PCs, Laptops usw. Auch als drahtloses Konferenzmikrofon und Fernbedienung nutzbar.	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus	Verschiedene Tinnitus-Strategien stehen zur Verfügung: die traditionelle Noiser-Therapie sowie die Tinnitus-Notch-Therapie. Die beiden Ansätze können sogar kombiniert werden.	✓	✓	✓	✓	
Tinnitus-Notch-Therapie	Bei diesem Therapieansatz wird die Tinnitusfrequenz aus dem Verstärkungsspektrum ausgespart und auf zusätzliches Noiserausachen verzichtet.	✓	✓	✓	✓	
Smart Optimizer und Data Logging	Der Smart Optimizer, zu finden unter Data Logging, bietet Empfehlungen für die Feineinstellung. Sie basieren auf einer Analyse der Nutzung der HörgeräteträgerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
Akklimatisierungsmanager	Diese Funktion ermöglicht es den TrägerInnen, sich durch stufenweise automatische Verstärkungsanhebung schonend an die benötigte Verstärkung zu gewöhnen.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Mit dieser Audiogrammfonktion in Connexx werden die Testsignale von den Hörgeräten übertragen.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit	AutoFit stellt automatisch eine optimierte Real-Ear-Insertion-Gain (REIG) ein, ohne dass manuell an die Zielkurve angepasst werden muss. Der neue IMC2-Standard erweitert die Palette der REM-Geräte, die AutoFit mit Connexx und Noah 4.5.1 oder höher unterstützen.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	TeleCare bietet Service aus der Ferne einschließlich zusätzlicher Tools zur Nachbetreuung: Fernanpassung, CareChat inkl. Textnachrichten, Telefon- und Videoanrufe, Online-Nachsorge.	✓	✓	✓	✓	✓

¹Für RIC/HdO-Hörgeräte in binauralen Anpassungen.
²Zusatzprogramm „Halliger Raum“ manuell wählbar
³Im Universalprogramm: Automatische Ausrichtung in Hörsituation „Auto“ und nach manuellem Umschalten im Zusatzprogramm „Spaziergang“.Ausrichtung nach vorne, rechts, links und nach hinten.
⁴Im Universalprogramm: Automatische Ausrichtung nach vorne, omnidirektional bei seitlicher Sprache und nach hinten. Im Zusatzprogramm „Spaziergang“: Automatische Ausrichtung nach vorne, rechts, links und nach hinten.

Kontrastreicher Klang ohne Kompromisse.

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

WIRELESS
4.0
E2E

OWN VOICE
PROCESSING
2.0
OVP 2.0

AUTO
ECHO
SHIELD
AES

HANDS
FREE
IOS
HFI



- Leistungsklassen
- 7AX

5AX

3AX

2AX

1AX

sDemo

Styletto AX

Das neue Styletto AX sieht so fantastisch aus, wie es klingt. Es kombiniert preisgekröntes SLIM-RIC-Design¹ mit innovativer Augmented Xperience Technologie und Aufladbarkeit. Doch seine besonderen Vorzüge sind das einzigartige, wunderschöne Design¹ in acht außergewöhnlichen Farben, kontrastreicher Klang, volle Konnektivität und eine längere Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bzw. bis zu 17 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

SLIM-RIC

Bauform			
Hörertyp	S-Receiver	M-Receiver	P-Receiver
Performance			
Matrix (2 ccm)	45/108 dB SPL	60/119 dB SPL	70/124 dB SPL
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

- Stylishes, preisgekröntes Design¹

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung

- Hands-free iOS mit CallControl, OVP 2.0 und Mein Wohlbefinden in 7AX bis 3AX, Auto EchoShield in 7AX

- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten

- Lithium-Ionen-Akkutechnologie

Signia App mit Mein Wohlbefinden

Mobiles Laden

Bluetooth

ASHA Android Direct-Streaming

CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1AX

Signia Assistant

CROS in einzigartigem Design



Kompatibel mit allen Leistungsklassen

7AX – 5AX – 3AX

2AX – 1AX

Mit CROS Styletto AX erweitern Sie Ihr Portfolio für Menschen mit einseitig nicht versorgbarem Hörverlust, die ein außergewöhnliches und modernes Design lieben. Die Augmented Xperience Chip-Plattform bietet e2e wireless 4.0 für noch bessere Audioqualität. CROS Styletto AX ist in allen Leistungsklassen einsetzbar, sodass der Einstieg in eine Hörversorgung erleichtert wird.

Die Styletto AX Charger



Styletto AX Dry&Clean Charger

Styletto AX Träger können ihren Hörgeräten das Maximum an Pflege zukommen lassen. Der Dry&Clean Charger für zuhause vereint drei Funktionen: Laden, Trocknen und Desinfizieren mit UV-Licht in einem. Ein weiterer Vorteil: Auch Otoplastiken mit Abstützung finden Platz im Dry&Clean Charger.



Styletto AX Mobile Charger

Besonders praktisch für unterwegs: Der Styletto AX Mobile Charger. Er dient als Etui, schaltet die Hörgeräte automatisch ab und sorgt mit seinem eingebauten Akku für vier volle Ladungen ohne zusätzliche Stromversorgung. Er ist per USB-C-Kabel oder Qi-Ladefläche aufladbar.

Die bunte Welt von Styletto AX

Black
Silver

Black
Graphite

Cosmic Blue
Rose Gold

Cosmic Blue
Silver

Cosmic Blue
Fine Gold

Snow White
Silver

Snow White
Fine Gold

Snow White
Rose Gold

Bei Styletto 7AX bis 3AX haben Ihre KundInnen die Wahl aus acht exklusiven Farbkombinationen. Styletto 2AX und 1AX sind in zwei Farben erhältlich: Black/Silver und Snow White/Silver.

¹Red Dot Design Award 2019 und iF Gold Award 2019 für Styletto, German Design Award 2020 für Styletto Connect

So klein kann Großartiges sein. Mit Bluetooth und Akku.

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

WIRELESS
4.0
E2E

AUTO
ECHO
SHIELD
AES

HANDS
FREE
IOS
HFI



Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Insio Charge&Go AX

Insio Charge&Go AX kombiniert Akkutechnologie und Direct-Streaming mit maximaler Individualität. Das erste maßgefertigte Signia Im-Ohr-Hörgerät mit Akku kommt ohne sichtbare Ladekontakte aus, sodass es mit einem attraktiven cleanen Design begeistert. Es verfügt über Dynamic Soundscape Processing 2.0, Auto EchoShield in 7AX sowie integrierte Bewegungssensoren und Hands-free-Telefonie mit iOS in 7AX bis 3AX. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 28 Stunden bzw. 24 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

Hauptmerkmale

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Hands-free iOS mit CallControl und Mein Wohlbefinden in 7AX bis 3AX, Auto EchoShield in 7AX
- Direct-Streaming von iOS- und
- ASHA-fähigen Android-Geräten
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie
- Integrierte Bewegungssensoren
- Cleanes Design ohne Ladekontakte

- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Bluetooth
- Android Direct-Streaming
- Wiederaufladbar
- Signia Assistant



Insio AX Mobile Charger
Die einzigartige Magnet-Resonanz-Ladetechnologie ermöglicht kontaktloses Laden, ohne dass die Hörgeräte exakt positioniert werden müssen.

	ITC ITE	ITC ITE	ITC
Bauform			
Performance			
Matrix (2 ccm)	124/65	118/55	113/50
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku		



Alleskönner: noch besser und diskreter

ACOUSTIC MOTION SENSORS
AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING
DSP

WIRELESS 4.0
E2E

OWN VOICE PROCESSING 2.0
OVP 2.0

AUTO ECHO SHIELD
AES

HANDS FREE IOS
HFI



Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX
- sDemo

Pure Charge&Go AX

Die innovative 2-Wege-Signalverarbeitung in jeweils bis zu 2 × 48 Kanälen ist vorrangig dafür verantwortlich, dass Pure Charge&Go AX seinen Vorgänger in Sachen Audiologie übertrifft. Auch die Modelle der Essential-Leistungsklassen sind hervorragend ausgestattet und bieten viele Vorzüge unserer neuesten Chip-Plattform Augmented Xperience wie 2 × 16 Kanäle und Dynamic Soundscape Processing 2.0. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 28 Stunden bzw. bis zu 24 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/110 dB	60/119 dB	65/122 dB	75/131 dB
Akku				
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Hands-free iOS mit CallControl, OVP 2.0 und Mein Wohlbefinden in 7AX bis 3AX, Auto EchoShield in 7AX
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie
- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Mobiles Laden
- Bluetooth
- ASHA Android Direct-Streaming
- CROS/BiCROS-Mikrofonggerät bis 1AX
- Signia Assistant

Längere Laufzeit. Kaum größer. Mit T-Spule.

ACOUSTIC MOTION SENSORS
AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING
DSP

WIRELESS 4.0
E2E

OWN VOICE PROCESSING 2.0
OVP 2.0

AUTO ECHO SHIELD
AES

HANDS FREE IOS
HFI



Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Pure Charge&Go T AX

Pure Charge&Go T AX ist die Version mit T-Spule. Es beinhaltet einen Hochleistungs-Akku für bis zu 39 Stunden bzw. bis zu 36 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming. So stellt es auch für Streaming-Power-User eine hervorragende Alternative dar. Sein Gehäuse ist dabei nur minimal größer.

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/110 dB	60/119 dB	65/122 dB	75/131 dB
Akku				
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Hands-free iOS mit CallControl, OVP 2.0 und Mein Wohlbefinden in 7AX bis 3AX, Auto EchoShield in 7AX
- Hochleistungsakku für bis zu 36 h Laufzeit
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie
- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Mobiles Laden
- Bluetooth
- ASHA Android Direct-Streaming
- CROS/BiCROS-Mikrofonggerät bis 1AX
- Integrierte T-Spule
- Signia Assistant

Augmented Xperience mit Batterie

ACOUSTIC MOTION SENSORS
AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING
DSP

WIRELESS 4.0
E2E

OWN VOICE PROCESSING 2.0
OVP 2.0

AUTO ECHO SHIELD
AES

HANDS FREE IOS
HFI



Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Pure 312 AX

Pure 312 AX bestechen durch ihr elegantes, schlankes Design. Trotz ihrer diskreten Form verfügen diese winzigen Hörgeräte über alle audiologischen Funktionen, welche die Augmented Xperience Plattform bereitstellt. Und sie bieten Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten, für maximalen Genuss von Musik, Telefonaten und TV. Pure 312 AX Hörgeräte erreichen mit einer Batterie des Typs 312 eine Laufzeit von etwa 4 Tagen.¹

- Hauptmerkmale
- Signia App mit Mein Wohlbefinden

Bluetooth

ASHA

Android Direct-Streaming

CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1AX

Signia Assistant

RIC				
Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
Performance				
Matrix (2 ccm)	44dB/108dB	58dB/116 dB	62 dB/119 dB	74 dB/128 dB
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	1,5 mA	1,7 mA	1,7 mA	1,7 mA

¹Berechnung basiert auf 17 Std. Tragezeit mit 5 Std. Streaming



Signia Xperience

Begeistern und bewegen

Leistungsklassen



Wie können wir Menschen mit Hörminderung für eine Hörgeräteversorgung gewinnen? Wir bei Signia widmen uns dieser Aufgabe jeden Tag. Indem wir immer wieder neue Lösungen und ikonische Innovationen entwickeln, ermöglichen wir HörgeräteträgerInnen echte Brillanz für ihr Leben und ihren Lifestyle.

Dafür verbinden wir höchsten Bedienkomfort und kompromisslose audiologische Performance zu modernster, wiederaufladbarer Hearwear. Mit einem einzigartigen Design, das Consumer Electronics Konkurrenz macht, entstehen brillante Lösungen. Hörgeräte, die begeistern und bewegen – junge Zielgruppen und NeukundInnen genauso wie erfahrene HörgeräteträgerInnen.



Xperience

Signia Xperience ist, ausgenommen Active/Active Pro, in allen Leistungsklassen von 7X bis 1X erhältlich, sodass Sie all Ihren KundInnen die passende Lösung bieten können.

HdO



Instant Fit



Signia Xperience Funktionen

Weiterentwickelte Analysemethoden und die intelligente Koordination der Algorithmen mit Dynamic Soundscape Processing sorgen dafür, dass Verstehen aus allen Richtungen und die Wahrnehmung von Richtung und Distanz eine neue Qualität erreichen.

Funktionen	Beschreibung	Leistungsklassen						
		7X	5X	3X	2X	1X	Active Pro	Active
Dynamic Soundscape Processing	Die einzigartige Layer-Technologie Dynamic Soundscape Processing, mit ihrer innovativen Akustik-Bewegungs-Sensorik, bietet herausragendes Hören in wechselnden Umgebungen.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○●	●●●○●	●●●●●	●●●○●
Akustische Sensoren	Die akustischen Sensoren erfassen mehr Aspekte des Umgebungsschalls als je zuvor und bieten damit genauere Informationen über die Bedürfnisse der HörgeräteträgerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bewegungs-sensoren¹	Ein integrierter Bewegungssensor erkennt, ob die TrägerInnen gehen, laufen oder sich nicht bewegen. Diese Informationen werden für die Verarbeitung dynamischer Hörsituationen verwendet.	✓	✓	✓				
OVP™ (Own Voice Processing)²	Die Echtzeit-Erkennung der eigenen Stimme (OVP™) sorgt für eine beeindruckend natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme.	●●●●●	●●●●●	●●●●●				
Signal-verarbeitung	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle²	48/20	32/16	24/12	16/8	16/8	48/20	16/8
Signia Assistant³	Der Signia Assistant ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer persönlichen Betreuung. Individuelle Klangeinstellungen können rund um die Uhr vorgenommen werden, sodass der Anpasserfolg noch schneller erreicht wird.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	Die führende Tele-Audiologie-Lösung ermöglicht virtuelle Hausbesuche, Fernanpassung Bluetooth®-fähiger Hörgeräte in Connexx, Hörübungen zur Eingewöhnung und tägliche Informationen über die Zufriedenheit der KundInnen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus	Verschiedene Tinnitus-Strategien stehen zur Verfügung: die traditionelle Noiser-Therapie sowie die Tinnitus-Notch-Therapie. Die beiden Ansätze können sogar kombiniert werden.	✓	✓	✓	✓		✓	
eWindScreen™	Windgeräusche werden gezielt reduziert. eWindScreen™ Binaural verbessert den Klangeindruck proaktiv, indem das Signal der weniger betroffenen Seite von beiden Geräten übertragen wird. Die Basis für eWindScreen Binaural ist e2e wireless.	✓ Binaural Auto im Universal- programm	✓ Binaural im Zusatz- programm	✓ Monaural	✓ Monaural			✓ Monaural Auto im Universal- programm
Richtmikrofon-System mit zwei Mikrofonen	Richtmikrofon-System, das aus zwei Mikrofonen pro Gerät besteht und bei 7X bis 3X sowie Active Pro per e2e wireless mit dem Hörgerät der anderen Seite zu einem binauralen Richtmikrofon-System verbunden ist	✓ Binaural	✓ Binaural	✓ Binaural	✓	✓	✓ Binaural	✓
Binaurales OneMic-Richtmikrofon 2.0	Die zweite Generation des binauralen OneMic-Richtmikrofons in Silk X arbeitet noch präziser, trotz kleinster Bauform, und ist ein wesentlicher Bestandteil von Dynamic Soundscape Processing.	✓	✓	✓				
SpeechFocus 360¹	Die Mikrofone richten sich directional nach vorne, links, rechts oder nach hinten aus, abhängig von der Richtung der dominanten Sprachquelle. Verfügbar in binauralen Anpassungen mit zwei Richtmikrofonen pro Gerät und e2e wireless.	✓ vorne/ hinten/ rechts /links⁴	✓ vorne/hinten/ omni⁵				✓ vorne/hinten/ rechts/links⁴	
Erweiterte Bandbreite	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen.	✓					✓	
EchoShield	Dieses spezielle Programm bietet ein besseres Sprachverstehen und reduziert den Höraufwand in halligen Räumen.	✓					✓	

- = Beste Performance
- = Mittlere Performance
- = Basis-Performance

¹Nicht verfügbar für Active/Active Pro und Silk X
²Bei Motion 7X SP 34/16
³Nicht verfügbar für Silk X
⁴Im Universalprogramm: automatische Ausrichtung in Hörsituation „Auto“ und nach manuellem Umschalten im Zusatzprogramm „Spaziergang“.
Nach vorne, rechts, links und nach hinten.
⁵Im Universalprogramm: automatische Ausrichtung nach vorne, omnidirektional bei seitlicher Sprache und nach hinten.
Im Zusatzprogramm „Spaziergang“: automatische Ausrichtung nach vorne, rechts, links und nach hinten.

Spitzenaudiologie im Earbud-Design



- Hauptmerkmale
- Einzigartiges Earbud-Design
 - Signia Xperience Technologie für brillanten Klang und Sprachverstehen
 - Fernbedienung
 - TeleCare
- Signia App

Instant Fit

Bluetooth

Mobiles Laden

Signia Assistant



Active Mobile Charger
Signia Active wird in einem Qi-ladefähigen Charger-Etui geliefert, das selbst über einen Akku verfügt und damit drei weitere Hörgeräte-Ladungen ermöglicht.

Signia Active/Active Pro

- Leistungsklassen
- Active Pro
- Active

Signia Active sind Hörsysteme mit brillanter audiologischer Performance in modernem Earbud-Design. Signia Active Pro ist die vollausgestattete Premium-Variante, Signia Active die preiswerte Alternative. Beide Modelle bieten Bluetooth-Konnektivität, Lithium-Ionen-Akkutechnologie und ein mit Qi-Standard ladbares mobiles Ladetui für weitere drei Tage Energie. Und beide Modelle verfügen über Xperience Funktionen wie Dynamic Soundscape Processing sowie den Signia Assistant. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 26 Stunden bzw. bis zu 23 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

IdO

Bauform	
	
Performance	
Matrix (2 ccm)	42/118 dB
Akku	
Typ	Lithium-Ionen-Akku

Diskretion garantiert



- Leistungsklassen
- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X
- sDemo


Silk X

Silk X ist die ideale Lösung für diejenigen, die Diskretion besonders schätzen, keine Hörgeräte hinter dem Ohr tragen möchten und nicht auf eine Maßanfertigung warten wollen. Auch Silk X TrägerInnen profitieren von der neuen Xperience Chip-Plattform und Dynamic Soundscape Processing. Silk X ist mit flexiblen Click Sleeves ausgestattet, die ein hohes Maß an Tragekomfort bieten, der früher nur bei maßgefertigten Lösungen möglich war.

- Hauptmerkmale
- Nahezu unsichtbar im Ohr für maximale Diskretion
 - Signia Xperience Technologie mit Dynamic Soundscape Processing
 - Click Sleeves für Instant Fit
 - Fernbedienung
 - TeleCare
- Signia App

CROS/BiCROS-Mikrofongerät

Instant Fit

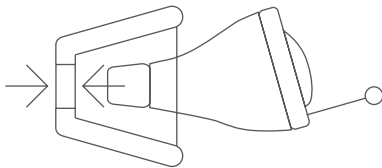

Ein Klick und fertig
Sleeves sind in vier Größen sowie belüftet und geschlossen verfügbar.

Instant Fit

Bauform	
	
Performance	
Matrix (2 ccm)	50/114 dB SPL
Batterie	
Typ	10
Stromverbrauch	1,2 mA

Akku-Komfort in 312er-Größe

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

OWN
VOICE
PROCESSING
OVP

ULTRA
HD
E2E



Leistungsklassen

- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X
- sDemo

Motion Charge&Go X

Das beeindruckend leistungsstarke Motion Charge&Go X ist in seiner kleinen Bauform mit einem 312er-Gerät vergleichbar. Der eingebaute Akku sorgt für bis zu 24 Stunden Betriebszeit bzw. bis zu 21 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming. Dieses kleine HdO ist ideal für Menschen, die sich robuste Hörgeräte mit schlankem Design und besonders einfacher Handhabung wünschen. Die neuen Tubes unterstützen die diskrete Optik. Und mit dem Signia Assistant bieten Sie Ihren KundInnen 24 Stunden Unterstützung.

HdO

Bauform			
	Tragehaken	ThinTube 3.0	ThinTube 3.0 P
Performance			
Matrix (2 ccm)	60 dB/133 dB SPL	60 dB/125 dB SPL	63dB/126 dB SPL
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

Signia App

312er-Design

Bluetooth

Wiederaufladbar

Signia Assistant

Zuverlässige Hightech-Power

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

OWN
VOICE
PROCESSING
OVP

ULTRA
HD
E2E



Leistungsklassen

- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X

Motion Charge&Go P X

Das kraftvolle WHO4-Modell Motion Charge&Go P X ist kleiner als sein Vorgänger, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Es kombiniert die neueste Signia Xperience Chip-Plattform mit dem vollen Komfort der Lithium-Ionen-Akkutechnologie, sodass Ihre KundInnen die optimale Unterstützung erhalten. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden bzw. bis zu 27 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

HdO

Bauform			
	Tragehaken	ThinTube 3.0	ThinTube 3.0 P
Performance			
Matrix (2 ccm)	77 dB/135 dB SPL	66 dB/130 dB SPL	70 dB/131 dB SPL
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

Signia App

Schmales Design

Bluetooth

Wiederaufladbar

Integrierte T-Spule

Signia Assistant

Super Power ohne Batteriewechsel

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

OWN
VOICE
PROCESSING
OVP

ULTRA
HD
E2E



Leistungsklassen

- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X

Motion Charge&Go SP X

Weltneuheit: Super Power-Verstärkung mit einem Hochleistungsakku, der bis zu 61 Stunden Betriebszeit ermöglicht bzw. bis zu 57 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming! Der perfekte Begleiter für Menschen mit an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit, die Sicherheit für dauerhafte und stabile Verstärkung benötigen. Xperience Technologie mit Bluetooth und App-Steuerung sind ideale Voraussetzungen, ein Leben mit Resthörigkeit zu meistern.

HdO	
Bauform	
	Motion Charge&Go SP X
Performance	
Matrix (2 ccm)	82 dB/140 dB SPL
Akku	
Typ	Lithium-Ionen-Akku

Hauptmerkmale

Signia App

Schmales Design

Bluetooth

61 Std. Laufzeit

Integrierte T-Spule

Signia Assistant

Xperience mit Batterie

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

ULTRA
HD
E2E

OWN
VOICE
PROCESSING
OVP



Leistungsklassen

- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X

Pure 312 X

Trotz AX Nachfolger belassen wir Pure 312 X auf unabsehbare Zeit im Portfolio. Bei maximal diskreter Bauform bietet Pure 312 X Direct-Streaming für iOS-Geräte ohne Zubehör. Für das Streaming von Android-Smartphones steht StreamLine Mic zur Verfügung und höchsten Fernsehgenuss verspricht die Bluetooth-Verbindung zu StreamLine TV. Über optionale Wechselgehäuse ist eine integrierte T-Spule erhältlich.

RIC				
Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
Performance				
Matrix (2 ccm)	45/108 dB	60/119dB	70/124 dB	75/130 dB
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	1,7 mA	1,9 mA	1,8 mA	1,8 mA

Hauptmerkmale

Signia App

Bluetooth

Optionale T-Spule

CROS/BiCROS-Mikrofongerät

Signia Assistant

Natural Xperience: bewährte Chip- Technologie

Leistungsklassen

- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- 2Nx
- 1Nx

Unsere bewährte Nx Chip-Plattform bleibt mit einigen Modellen im Portfolio. Wünschen Ihre KundInnen beispielsweise kleinstmöglich maßgefertigte Im-Ohr-Hörgeräte, sind Insio Nx IIC oder CIC die richtige Wahl. Auch batteriebetriebene Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte stehen weiterhin zur Verfügung.



Signia Nx

Signia Nx ist in allen Leistungsstufen von 7 bis 1 erhältlich, sodass Sie allen Ihren KundInnen bewährte, zuverlässige Technik bieten können.

HdO



Motion 13 Nx



Motion 13P Nx

IdO



IIC



CIC



ITC/ITE

Signia Nx Funktionen

Bereits Signia Nx bietet die herausragende Funktion OVP™. Die separate Verarbeitung der eigenen Stimme lässt diese natürlicher klingen. Verstehen anderer Personen und Konnektivität werden ebenso auf hohem Niveau unterstützt.

Funktion	Information	Leistungsklassen				
Audiologie		7Nx	5Nx	3Nx	2Nx	1Nx
OVP™ (Own Voice Processing) ¹	Own Voice Processing (OVP™) nutzt die Echtzeiterkennung der Stimme der HörgeräteträgerInnen, um die natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme zu erzielen.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	-	-
3D-Klassifikation	Anders als konventionelle Klassifizierungssysteme, die sich ausschließlich auf akustische Daten verlassen, analysiert die 3D-Klassifikation multidimensionale Informationen aus der Hörumgebung der TrägerInnen und deren Kommunikationsverhalten. Informationen über die Stimmaktivität, den Bewegungsstatus und akustische Informationen werden genutzt, um die Performance der Hörgeräte auf die Bedürfnisse der TrägerInnen zuzuschneiden.	●●●●●	●●●●●	●●●	-	-
Sound Clarity	Sound Clarity bietet lebensnahen Klang, der das volle Spektrum von Hörsituationen abdeckt. Außergewöhnliche Klarheit wird durch folgende Features erreicht: HD Spatial, erweiterter Dynamikbereich, EchoShield, HD Music, eWindScreen, Sprach- und Störgerauschmanagement sowie das Rückkopplungsmanagement.	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
Speech Quality	Speech Quality für bestes Sprachverstehen im Störlärm durch echte binaurale Signalverarbeitung, Ultra HD e2e mit Richtwirkung Plus, Speech Focus 360 und TwinPhone	●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●
Konnektivität						
Direct-Streaming	Mit Signia Nx Hörgeräten ist das Direct-Streaming von Telefonaten und Musik direkt in die Hörgeräte möglich. Mit StreamLine Mic ist Streaming auch für Android-Geräte verfügbar. Und mit StreamLine TV kann auch der Fernsehton direkt in die Nx Hörgeräte gestreamt werden.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Signia App	Die Signia App bietet umfassende Fernbedienungsoptionen mit 360°-Mikrofon-Steuerung. NutzerInnen können Programm, Lautstärke und Klang einstellen. Die App empfängt Daten der Smartphone-Bewegungssensoren, damit sich die Hörgeräte besser auf dynamische Situationen einstellen können.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Betreuung aus der Ferne						
TeleCare	Connexx ermöglicht, zusammen mit TeleCare, eine vollumfängliche Echtzeit-Einstellung aus der Ferne. So können Sie Bluetooth-fähige Hörgeräte der TrägerInnen präzise auf deren alltägliche Hörsituationen abstimmen und von sofortigem Feedback profitieren, wie bei einem virtuellen Hausbesuch.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

●●●●● = Beste Performance

¹Nicht bei Im-Ohr-Hörgeräten

Maßgefertigte Diskretion



Leistungsklassen

- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- 2Nx
- 1Nx

Insio Nx

Für Menschen, die maßgefertigte Im-Ohr-Hörgeräte kleinster Bauform wünschen, sind Insio Nx die ideale Wahl. Die batteriebetriebenen CIC- und IIC-Modelle ohne Bluetooth-Spule können sehr klein gebaut werden.

Ab Leistungsklasse 3 verfügen CICs sogar über ein binaurales OneMic-Richtmikrofonsystem, das das Hören in geräuschvoller Umgebung zusätzlich erleichtert. Modelle der CIC-Bauform sind optional ohne e2e Wireless erhältlich, IIC-Hörgeräte werden stets mit e2e Wireless gefertigt.

IdO				
Bauform	IIC	CIC	ITC	ITE
Performance				
Matrix (2 ccm)	50/113 dB	50/113 dB 55/118 dB 65/124 dB	50/113 dB 55/118 dB 65/124 dB	55/118 dB 65/124 dB
Batterie				
Typ	10	10	312	312
Stromverbrauch	1,3 mA	1,3 mA	1,3 mA	1,3 mA

¹verfügbar in Insio Nx ITC und ITE mit Bluetooth-Antenne

Hauptmerkmale

Signia App

Bluetooth¹

CROS/BiCROS-Mikrofongerät

Hinter-dem-Ohr mit Batterie



Leistungsklassen

- 7Nx
- 5Nx
- 3Nx
- 2Nx
- 1Nx

Motion 13 Nx

Das vielseitige Motion 13 Nx ist ideal für TrägerInnen, die auf Batteriebetrieb ihrer Hörgeräte Wert legen. Diese kleinen HdO-Hörgeräte bieten Konnektivität in kompakter Form mit einer Telefonspule, die in einem optional bestellbaren Batteriefach integriert ist.

HdO		
Bauform	Motion 13 Nx	Motion 13P Nx
Performance		
Matrix (2 ccm)	ThinTube 56/126 dB Tragehaken 63/134 dB	ThinTube 65/130 dB Tragehaken 77/135 dB
Batterie		
Typ	13	13
Stromverbrauch	1,4 mA	1,7 – 2,0 mA

Hauptmerkmale

Signia App

Bluetooth

T-Spule mit optionalem Batteriefach

CROS/BiCROS-Mikrofongerät

- Natürliche eigene Stimme und hervorragendes Sprachverständnis im Lärm, auch in Bewegung
- TeleCare
- Fernbedienung
- Konnektivität & Streaming

Effektive Anpassung, bemerkenswerte Zuverlässigkeit

Leistungsklasse

Basis

Mit der Intuis 3 Familie von Signia können Sie Ihren KundInnen preiswert den Komfort einer einfachen, diskreten Handhabung und TeleCare bieten. Intuis Hörgeräte – von RIC bis HdOs – sind über die Signia App fernsteuerbar und sogar TeleCare-fähig.

Alle RIC– und HdO-Modelle der Intuis 3 Familie von Signia bieten bewährte Technologie mit einer Signalverarbeitung in 12 Kanälen und 6 einstellbaren Kanälen. Sie sind per InSituGram anpassbar und verfügen über ein automatisches Richtmikrofon, das für besseres Verstehen in lauter Umgebung sorgt.

RIC

HdO



Intuis 3 RIC 312



Intius 3 S



Intius 3 M



Intius 3 P



Intius 3 SP

Intuis Funktionen

Die HdO-Modelle der Intuis 3 Familie zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit und einen günstigen Preis aus. Alle Modelle sind mit einer Signalverarbeitung in 12 Frequenzkanälen und einem automatischen Richtmikrofon ausgestattet.

Funktion	Leistungsklasse
	Basis
	Intuis 3
Kanäle/einstellbar	12/6
Anzahl Hörprogramme	4
Richtmikrofon	automatisch
Klangkomfort	
Rückkopplungsauslöschung	•
Sprach- und Störgeräuschmanagement	an/aus
eWindScreen	-
e2e wireless	-
SoundSmoothing	-
Individualisierung	
Data Logging	•
Automatische Akklimatisierung	-
Tinnitus-Funktion	-
Streaming/ Fernbedienung	
Signia App	•
miniPocket	•

Kompakt und leistungsstark

Hauptmerkmale

- Für nahezu alle Hörverluste
- Schmales Design für hohen Tragkomfort
- TeleCare
- Fernbedienung

 Signia App



Intuis 3 RIC 312

Leistungsklasse

Basis

Das Intuis 3 RIC 312 ergänzt die robuste Signia Intuis 3 Serie als attraktive und praktische Lösung mit externem Hörer. Alle Modelle der Signia Intuis 3 Familie verfügen über eine bewährte Hörgeräte-Technologie mit 12 Frequenzkanälen und sind mit einem automatischen Richtmikrofonsystem ausgestattet. Die komplette Intuis 3-Familie ist zudem per Signia App und miniPocket fernbedienbar.

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	45/108 dB	60/119 dB	70/124 dB	75/130 dB
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	0,9 mA	1,0 mA	1,0 mA	1,1 mA

Bewährte Technik, preiswerter Komfort

Hauptmerkmale

- Für nahezu alle Hörverluste
- Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort
- TeleCare
- Fernbedienung
- 6-kanalige MPO für bessere Feinanpassung

 Signia App

 T-Spule (außer Intuis 3 S)



Intuis 3 HdOs

Leistungsklasse

Basis

Auch die HdO-Modelle der Intuis 3 Familie zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit und einen günstigen Preis aus. Alle Modelle sind mit einer Signalverarbeitung in 12 Frequenzkanälen und einem automatischen Richtmikrofon ausgestattet.

HdO

Bauform				
	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	LifeTube 45/124 dB Tragehaken 55/124 dB	LifeTube 53/125 dB Tragehaken 60/130 dB	Tragehaken 70/134 dB	Tragehaken 80/140 dB
Batterie				
Typ	312	13	13	675
Stromverbrauch	0,9 mA	1,0 mA	1,4 mA	2,4 mA

Farben SLIM-RIC, RIC und HdO

Hörgeräte	Farben											
	Beige	Granit	Grau	Braun	Schwarz	Silber	Perlweiß	Goldblond	Dunkelblond	Champagner	Dunkles Granit	Dunkelbraun
	1	2	3	4	5	6	7	30	31	37	66	72
Styletto AX ¹					•							
Pure Charge&Go AX	•				•		•		•	•		•
Pure Charge&Go T AX	•				•		•		•	•		•
Pure 312 AX	•				•		•		•	•		•
Motion Charge&Go X	•	•	•		•		•		•	•		•
Motion Charge&Go P X	•	•	•		•		•		•	•		•
Motion Charge&Go SP X	•	•	•		•		•		•	•		•
Motion 13 Nx	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Motion 13P Nx	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Intuis 3	•		•	•	•	•					•	
Intuis 3 RIC 312	•		•	•	•	•					•	

¹Styletto 2AX und 1AX nur in den Farben Black/Silver und Snow White/Silver erhältlich

Silber	Rose Gold	Black/Silver	Cosmic Blue/Rose Gold	Snow White/Rose Gold	Graphit	Fine Gold	Black/Graphite	Cosmic Blue/Silver	Snow White/Silver	Snow White/Fine Gold	Cosmic Blue/Fine Gold
926	927				646	647					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•				•	•					
•	•				•	•					
•	•										
•	•										
•	•										

Farben Instant Fit IdO

Farbbezeichnung	Seite	Active Pro/Active	Silk X
 Transparent Blau/Mokka	links		•
 Transparent Rot/Mokka	rechts		•
 Transparent Blau/Schwarz	links		•
 Transparent Rot/Schwarz	rechts		•
 Black/Black	rechts und links	•	
 Black/Silver	rechts und links	•	
 Snow White/Rose Gold	rechts und links	•	



Farben maßgefertigte IdO

Schalen-Farben										Steht keine Faceplate in der gleichen Farbe zur ausgewählten Schale zur Verfügung, wird das Gerät mit einer Faceplate in der Farbe Tan gefertigt.					
Vollfarbe										Transparent					
Weiß	Beige	Tan	Mokka	Braun	Dunkelbraun	Schwarz	Rot	Blau	Klar						
R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L	R L
Koloriert mit Pearl-Effekt (Vent nicht koloriert)										Koloriert (Vent nicht koloriert)					
Magenta	Orange	Kupfer	Gelb	Grün			Rot	Blau							
R L	R L	R L	R L	R L			R L	R L		R L	R L	R L	R L	R L	R L

Für Inσιο Nx IIC stehen nur die Farben Tan, Dunkelbraun, Transparent Rot und Transparent Blau zur Verfügung.

Details zur Bestellung von maßgefertigten IdOs entnehmen Sie bitte dem aktuellen Bestellformular unter signia-pro.de/bestellformular

Funktionsübersicht RIC und SLIM-RIC

Typ	Pure Charge&Go AX	Pure Charge&Go T AX	Pure 312 AX
Leistungsklassen	7AX/5AX/3AX/2AX/1AX		
			
Produktdetails			
Matrix (2 ccm)	S 46/110 dB M 60/119 dB P 65/122 dB HP 75/131 dB	S 46/110 dB M 60/119 dB P 65/122 dB HP 75/131 dB	S 44dB/108db M 58dB/116 dB P 62 dB/119 dB HP 74 dB/128 dB
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	312
Stromverbrauch			1.5-1.7 mA
Funktionen			
Frequenzkanäle/Kompressionskanäle	7AX – 48/20 5AX – 32/16 3AX – 24/12 2AX – 16/8 1AX – 16/8	7AX – 48/20 5AX – 32/16 3AX – 24/12 2AX – 16/8 1AX – 16/8	7AX – 48/20 5AX – 32/16 3AX – 24/12 2AX – 16/8 1AX – 16/8
Hörprogramme	6	6	6
e2e wireless	●	●	●
Direct-Streaming	●	●	●
TwinPhone	● ¹	● ¹	● ¹
TeleCare	● ²	● ²	● ²
Tinnitus-Funktionen (Leistungsklasse 7 bis 2)	●	●	●
CROS/BiCROS	● ⁷	● ⁷	● ⁷
Programmumschaltung	●	●	●
Wipptaster	● ⁵	● ⁵	● ⁵
Wiederaufladbar	●	●	-
T-Spule	-	●	-
Batteriefachscharter	-	-	●
Audioeingang	● ⁶	● ⁶	● ⁶
Modifikationen			
Wechselgehäuse	○	○	○
App-/Zubehörkompatibilität			
Signia App	●	●	●
StreamLine TV/StreamLine Mic	●	●	●
miniPocket	●	●	●
ConnexxAir	-	-	-
Noahlink Wireless	●	●	●
Programmieradapter	-	-	-
Receiver	miniReceiver 3.0	miniReceiver 3.0	miniReceiver 3.0

¹Über Wipptaster, Signia App oder miniPocket

²TeleCare über Connexx

³TeleCare 4-Band-Equalizer

⁴Mit CROS Pure Charge&Go X bzw. CROS Pure 312 X.
Nicht verfügbar in Leistungsklassen 1 und 2

⁵In Connexx programmierbar

⁶Über Direct-Streaming

⁷Mit CROS Pure Charge&Go AX bzw. CROS Pure 312
oder CROS Styletto AX in 7AX bis 1AX

⁸Über Signia App oder miniPocket

Styletto AX	Pure Charge&Go X	Pure 312 X	Intuis 3 RIC 312
7AX/5AX/3AX/2AX/1AX	7X/5X/3X/2X/1X		Basis
			
S 45/108 dB M 60/119 dB P 70/124 dB -	S 45/108 dB M 60/119 dB P 70/124 dB HP 75/130 dB	S 45/108 dB M 60/119 dB P 70/124 dB HP 75/130 dB	S 45/108 dB M 60/119 dB P 70/124 dB HP 75/130 dB
Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	312	312
		1,7 – 1,9 mA	0,9 – 1,1 mA
7AX – 48/20 5AX – 32/16 3AX – 24/12 2AX – 16/8 1AX – 16/8	7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	12/6
6	6	6	4
●	●	●	-
●	●	●	-
● ⁸	● ¹	● ¹	-
● ²	● ²	● ²	● ³
●	●	●	-
● ⁷	● ⁴	● ⁴	-
-	-	-	-
-	● ⁵	● ⁵	● ⁵
●	●	-	-
-	-	○	●
-	-	●	●
● ⁶	● ⁶	● ⁶	-
-	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	-
-	-	-	Typ 312
miniReceiver 3.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0	miniReceiver 2.0

● Standard

○ Optional

Funktionsübersicht Instant Fit IdO und IdO

Typ	Insio Charge&Go AX	Silk X Instant Fit CIC	Active Pro	Active
Leistungsklassen	7AX/5AX/3AX /2AX/1AX	7X/5X/3X//2X/1X		
				
Produktdetails				
Matrix (2 ccm)	S 50/113 dB M 55/118 dB P 65/124 dB	50/114 dB	42/118 dB	42/118 dB
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	10	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku
Stromverbrauch		1,2 mA		
Funktionen				
Frequenzkanäle/ Kompressionskanäle	7AX – 48/20 5AX – 32/16 3AX – 24/12 2AX – 16/8 1AX – 16/8	7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	48/20	16/8
Hörprogramme	6	6	6	4
e2e wireless	●	●	●	●
Direct-Streaming	●	-	●	●
TwinPhone	● ¹	● ¹	● ¹	-
TeleCare	● ²	● ³	● ²	● ²
Tinnitusfunktionen	●	●	●	-
CROS/BiCROS	● ¹¹	● ⁹	-	-
Programmumschaltung	●	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Lautstärkeeinstellung	-	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
T-Spule	-	-	-	-
Batteriefachscharter	-	●	-	-
Audioeingang	● ⁷	-	● ⁷	● ⁷
Optivent		-	-	-
App-/Zubehörkompatibilität				
Signia App	●	●	●	●
StreamLine TV/StreamLine Mic	●	-	●	●
miniPocket	●	●	●	●
ConnexxAir	-	●	-	-
Noahlink Wireless	●	-	●	●
Programmiergerät	Noahlink Wireless	ConnexxAir	Noahlink Wireless	Noahlink Wireless

¹Über Signia App oder miniPocket, Leistungsklasse 7 bis 3
²In Connexx programmierbar
³TeleCare 4-Band-Equalizer
⁴Über Signia App oder miniPocket
⁵Mit CROS Pure 312 Nx in 7Nx bis 3Nx
⁶Mit Bluetooth-Funktion

⁷Über Direct-Streaming
⁸Über Signia App, miniPocket oder optionalem Taster, Leistungsklassen 7 bis 3
⁹CROS Silk X in 7X bis 3X
¹⁰Mit CROS Silk Nx in 7Nx bis 3Nx
¹¹Mit CROS Pure Charge&Go AX und CROS Pure 312 AX in 7AX bis 1AX

Insio Nx IIC/CIC	Insio Nx ITC	Insio Nx ITE
7Nx/5Nx/3Nx/2Nx/1Nx		
		
S 50/113 dB M 55/118 dB P 65/124 dB	S 50/113 dB M 55/118 dB P 65/124 dB	M 55/118 dB P 65/124 dB
10	312	312
1,3 mA	1,3 mA	1,3 mA
7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12 2Nx – 16/8 1Nx – 16/8	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12 2Nx – 16/8 1Nx – 16/8	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12 2Nx – 16/8 1Nx – 16/8
6	6	6
○	○	○
-	● ⁶	● ⁶
●	● ⁸	● ⁸
● ³	● ^{2,6}	● ^{2,6}
●	●	●
● ¹⁰	● ⁵	● ⁵
○ ⁴	○ ^{4,6}	○ ^{4,6}
○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
-	-	-
●	●	●
-	○ ⁷	○ ⁷
○	○	○
●	●	●
-	● ⁶	● ⁶
●	●	●
-	-	-
-	● ⁶	● ⁶
ConnexxAir	Flex Connector	Flex Connector

● Standard
○ Optional

Funktionsübersicht HdO

Typ		Motion C&G X	Motion C&G P X	Motion C&G SP X	Motion 13 Nx
Leistungsklassen		7X/5X/3X/2X/1X			7Nx/5Nx/3Nx/2Nx/1Nx
					
Produktdetails					
Matrix (2 ccm)	Tragehaken ThinTube 3.0/ ThinTube 3.0 P LifeTube	60 dB/133 dB SPL 60 dB/125 dB SPL 63 dB/126 dB SPL -	77 dB/135 dB SPL 66 dB/130 dB SPL 70 dB/ 131 dB SPL -	82 dB/140 dB SPL - - -	56/126 dB - - 63/134 dB
Batterietyp		Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	13
Stromverbrauch					1,4 – 2,0 mA
Funktionen					
Frequenzkanäle/ Kompressionskanäle		7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	7X – 48/20 5X – 32/16 3X – 24/12 2X – 16/8 1X – 16/8	7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12 2Nx – 16/8 1Nx – 16/8
Hörprogramme		6	6	6	6
e2e wireless		●	●	●	●
Direct-Streaming		●	●	●	●
TwinPhone		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
TeleCare		● ²	● ²	● ²	● ²
Tinnitus-Funktionen		●	●	●	●
CROS/BiCROS		●	●	●	● ^{2,5}
Programmumschaltung		● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
Lautstärkeeinstellung		● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
Wiederaufladbar		●	●	●	-
T-Spule		-	●	●	○
Batteriefachshalter		-	-	-	●
Audioeingang		● ⁷	● ⁷	● ⁷	● ⁷
Modifikationen					
Wechselgehäuse		○	○	-	○
App-/Zubehörkompatibilität					
Signia App		●	●	●	●
Smart Connect		-	-	-	-
StreamLine TV/StreamLine Mic		●	●	●	●
miniPocket		●	●	●	●
ConnexxAir		-	-	-	-
Noahlink Wireless		●	●	●	●
Programmieradapter		-	-	-	Typ 13
Tubes		ThinTube 3.0/ Tragehaken	ThinTube 3.0/ Tragehaken	Tragehaken	ThinTube/ Tragehaken

¹Über Wipptaster, Signia App oder miniPocket
²TeleCare über Connexx
³TeleCare 4-Band-Equalizer
⁴Nicht verfügbar in Leistungsklassen 1 und 2

⁵Mit CROS Pure 312 Nx oder CROS Pure Charge&Go Nx
⁶In Connexx programmierbar
⁷Über Direct-Streaming
⁸Über optionales Batteriefach mit Audioschuh

Motion 13P Nx	Intuis 3 S	Intuis 3 M	Intuis 3 P	Intuis 3 SP
7Nx/5Nx/3Nx/2Nx/1Nx	Basis			
				
65/130 dB - - 77/135 dB 13 1,7 – 2,0 mA	- 45/124 dB - 55/124 dB 312 0,9 mA	- 53/125 dB - 60/130 dB 13 1,0 mA	- - - 70/134 dB 13 1,4 mA	- - - 80/140 dB 675 2,4 mA
7Nx – 48/20 5Nx – 32/16 3Nx – 24/12 2Nx – 16/8 1Nx – 16/8	12/6	12/6	12/6	12/6
6 ● ● ● ¹ ● ² ● ● ^{4,5} ● ⁶ ● ⁶ - ○ ● ● ⁷	4 - - - - - - ● ⁶ - - - - -	4 - - - - - - - ● ⁶ - - ● ○ ⁸	4 - - - - - - ● ⁶ - - - - ○ ⁸	4 - - - - - - ● ⁶ - - - - ○ ⁸
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	-	-	-	-
Typ 13	Typ 312	Typ 13	Programmierschuh/ CS 44 Kabel	Programmierschuh/ CS 44 Kabel
ThinTube/ Tragehaken	LifeTube	LifeTube	-	-

● Standard
○ Optional

Überblick Zubehör

Sender



Einmaliges Streaming-Erlebnis in bester Klangqualität mit **StreamLine TV**. Der Transmitter überträgt den Fernseh-Ton in Dolby Digital direkt in Bluetooth-fähige Hörgeräte. Die Kopplung erfolgt vollautomatisch, indem die Hörgeräte auf den Sender gelegt werden.



StreamLine Mic ermöglicht hands-free Audio-Streaming von Telefonanrufen. Es dient als Verbindungsgerät für Audiostreaming mit Android-Smartphones ohne ASHA. Auch als drahtloses Konferenzmikrofon und Fernbedienung nutzbar.



miniPocket ist eine Fernbedienung für das Wesentliche: Programmwechsel, Lautstärkeeinstellung und Stummschalten. Sie ist kleiner als ein Autoschlüssel und kann, wie ein Anhänger, an einem Schlüsselring befestigt werden. Eine hervorragende Lösung für HörgeräteträgerInnen, die kein Smartphone besitzen und eine einfache Bedienung schätzen.

CROS/BiCROS



Für Menschen mit nicht versorgbarem Hörverlust auf einem Ohr. Das CROS-System empfängt den Schall auf der nicht versorgbaren Seite und überträgt diesen in das Hörgerät auf der anderen Seite. Damit wird die Ansprechbarkeit von beiden Seiten gewährleistet.

Ladegeräte



HörgeräteträgerInnen bevorzugen eine Versorgung, die sie leicht handhaben können. Signia Hörgeräte mit Lithium-Ionen-Akku leisten einen großen Beitrag dazu. Nicht nur das lästige Batteriewechseln entfällt. Signia Hörgeräte schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladegerät entnommen werden, und im Ladegerät aus. KundInnen müssen sich keinerlei Gedanken über eine Überladung machen. Der Ladevorgang stoppt automatisch, wenn die Hörgeräte vollständig aufgeladen sind.



3 in 1

Mobile Charger mit integriertem Akku bieten Ladepower für mehrere Tage. Für stationäres Laden zuhause stehen offene und geschlossene Charger mit Kabelanschluss zur Verfügung. Offene Ladegeräte sind besonders einfach in der Handhabung. Geschlossene Charger schützen die Hörgeräte beim Laden besonders gut. Und ideale Pflege versprechen Dry&Clean Charger, da sie Laden, Trocknen und Desinfizieren in einem Gerät vereinen. Ein weiterer Vorteil: Der Innenraum ist auch für große Otoplastiken geeignet.

Zubehör und Kompatibilitäten

Diese Übersicht zeigt Ihnen, welches Zubehör speziell für unsere Hörgeräte entwickelt wurde. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen StreamLine TV. Durchschnittlich vier Stunden beschäftigt sich jede/-r Deutsche zwischen 14 und 69 Jahren pro Tag mit Fernsehen (Quelle: Statista, 2020). HörgeräteträgerInnen erleben mit StreamLine TV eine große Erleichterung beim Fernsehen. Wussten Sie, dass für die Bluetooth-Übertragung vom Fernseher kein Smartphone benötigt wird?

Hörgeräte	Signia App	CROS/BiCROS	StreamLine TV	StreamLine Mic	mini-Pocket
Styletto AX	●	● ⁸	●	●	●
Insio Charge&Go AX	●	● ⁵	●	●	●
Pure Charge&Go AX	●	● ⁵	●	●	●
Pure Charge&Go T AX	●	● ⁵	●	●	●
Pure 312 AX	●	● ⁵	●	●	●
Active Pro	●	-	●	●	●
Motion Charge&Go X	●	● ⁶	●	●	●
Motion Charge&Go P X	●	● ⁶	●	●	●
Motion Charge&Go SP X	●	● ⁶	●	●	●
Silk X	●	● ⁷	-	-	●
Motion 13 Nx	●	● ¹	●	●	●
Motion 13P Nx	●	● ¹	●	●	●
Insio Nx	●	● ^{3, 4}	● ²	● ²	●
Intuis 3	●	-	-	-	●
Intuis 3 RIC 312	●	-	-	-	●

¹Kompatibel mit CROS Pure 312 Nx oder CROS Pure Charge&Go Nx

²Kompatibel mit Bluetooth-fähigen Insio Nx ITC/ITE

³Insio Nx IIC und CIC sind kompatibel mit CROS Silk Nx

⁴Bluetooth-fähige Insio Nx ITC und IdO sind kompatibel mit CROS Pure 312 Nx

⁵Kompatibel mit CROS Pure Charge&Go AX und CROS Pure 312 AX

⁶Kompatibel mit CROS Pure Charge&Go X und CROS Pure 312 X

⁷Kompatibel mit CROS Silk X

⁸Kompatibel mit CROS Styletto AX

Charger Kompatibilitäten

Nicht nur Signia Akku-Hörgeräte gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen. Auch unser Angebot an Chargern bietet eine einzigartige Auswahl. Es stehen verschiedene Ladegeräte für die unterschiedlichen Hörgerätemodelle zur Verfügung. Je nach den Vorlieben und dem Lebensstil Ihrer KundInnen.

Haben sie sich beispielsweise für Pure Charge&Go AX entschieden, können sie sogar aus drei verschiedenen Ladegeräten wählen: Für besonders einfache Handhabung den offenen Standard-Charger, für den Einsatz unterwegs den Pure Mobile Charger und zur optimalen Pflege den Pure Dry&Clean Charger.

					
Typ	Insio AX Charger	Active Mobile Charger	Styletto AX Mobile Charger	Pure AX Mobile Charger	Pure AX Charger
	10997503	10991346	21003217	10993119	10981896
Styletto AX 7-1	-	-	●	-	-
Insio Charge&Go AX 7-1	●	-	-	-	-
Pure Charge&Go AX 7-1	-	-	-	●	●
Pure Charge&Go T AX 7-1	-	-	-	●	●
Active Pro / Active	-	●	-	-	-
Motion Charge&Go X 7-1	-	-	-	-	-
Motion Charge&Go P X 7-1	-	-	-	-	-
Motion Charge&Go SP X 7-1	-	-	-	-	-

						
Motion P X Charger	Motion SP X Charger	Styletto AX Dry&Clean Charger	Pure AX Dry&Clean Charger	Motion P X Dry&Clean Charger	Motion SP X Dry&Clean Charger	Induktiv-Charger II*
10981894	10981895	21007594	10991651	10991639	10991645	10966943
-	-	●	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	-	-
-	-	-	●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	●
●	-	-	-	●	-	-
-	●	-	-	-	●	-

● kompatibel

*Alternativ: Induktiv-Charger E (schwarz/offen) mit der Sachnummer 10991800

Mehr Effizienz, mehr Unterstützung

Signia App Eine App für alles

Eine Smartphone-App für alle Hörgeräte: Die neue Signia App bietet Menschen mit Hörgeräten alle Annehmlichkeiten und die Diskretion, die sie sich wünschen. Die Signia App stellt sich auf das jeweilige Hörgerätemodell ein. Nur die vorhandenen Funktionen werden angezeigt. Einfach auf dem Smartphone installieren, um die Hörgeräte zu steuern, Musik vom Telefon, TV und anderen kompatiblen Geräten zu streamen oder sich über die integrierten TeleCare-Funktionen mit Ihnen in Verbindung zu setzen.



Kompatibel mit Android und iOS.
Der Download ist kostenlos.



TeleCare

- Engerer Kontakt zu KundInnen während der Testphase
- Zufriedenheitsbewertungen
- Online-Termine für Korrekturen
- Geringerer Aufwand für HörakustikerInnen und KundInnen

Fernbedienung

- Hörprogramm und Lautstärke
- Klangeinstellung mit Sound Balance
- Richtungshören
- Verbindungs- und Batteriestatus
- Fernbedienung auch ohne Bluetooth-Verbindung

Konnektivität & Streaming

- Einfache Aktivierung des Fernsehtons
- Streaming-Lautstärke einstellen
- Steuerung eines CROS-Mikrofongeräts
- Leichte Handhabung von StreamLine Mic



TeleCare



Fern-
bedienung



Konnektivität &
Streaming



Signia
Assistant




Signia Assistant Support mit künstlicher Intelligenz

Der Signia Assistant ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer persönlichen Betreuung. Damit helfen Sie Ihren KundInnen auch außerhalb Ihrer Geschäftszeiten.

Der revolutionäre Signia Assistant


Der Signia Assistant ist eine Funktion der Signia App für AX und X Versorgungen. Mithilfe künstlicher Intelligenz bietet der Signia Assistant Klangkorrekturen in Alltagssituationen, die Ihre KundInnen 24 Stunden lang und jeden Tag in Anspruch nehmen können.

Neu: Streaming-Klangkorrekturen in den drei Kategorien Audio, TV und Hands-free.

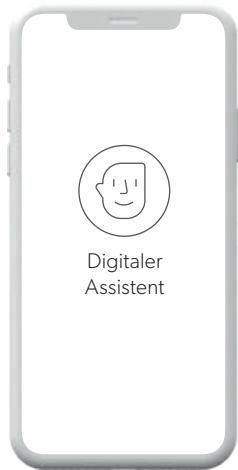

Überblick in Connexx

Als HörakustikerIn behalten Sie stets den Überblick. So können Sie einfach nachvollziehen, welche Änderungen zum bevorzugten Klang geführt haben.

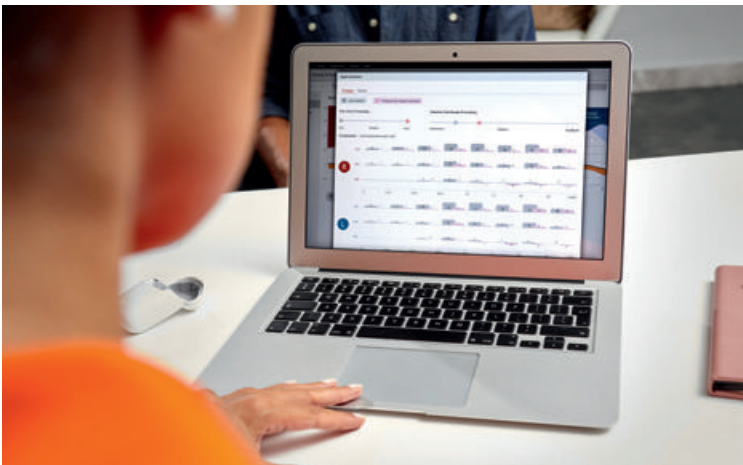

Vorteile des Signia Assistant mit KI:

- 24/7-Support
- Höhere Zufriedenheit und schnellerer Anpasserfolg
- Klangeinstellungen mit künstlicher Intelligenz, basierend auf einer großen Datenmenge menschlicher Bewertungen
- Klangänderungen in Connexx nachvollziehbar

Mein Wohlbefinden – Der integrierte Aktivitätstracker

Aktiv hören, aktiv leben

Mit Mein Wohlbefinden in der Signia App und Hörgeräten der Leistungsklassen 7AX bis 3AX wird die erfolgreiche AX Hörgeräteplattform für Ihre KundInnen noch attraktiver. Die Messung von Gesundheitsindikatoren trägt wissenschaftlich erwiesen dazu bei, die körperliche Aktivität aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Wer fit und gesund ist, trainiert sein Gehör durch gesteigerte Aktivität im Alltag.^{1,2}

AX Hörgeräte schicken die individuellen Nutzungsdaten an die Signia App. Sie sind somit ausschließlich von den KundInnen selbst einsehbar. Durch Antippen der jeweiligen Funktion gelangt man zur Übersicht Tag/Woche/Monat/Jahr und zum Einstellbereich des Ziels. Alle 15 Minuten werden die Ergebnisse in der Signia App aktualisiert.

Aktiv im Alltag

Schrittzähler liegen im Trend. Unter Mein Wohlbefinden in der Signia App finden Ihre KundInnen „Schritte“ und „Aktivitäten“. Damit können sie ihre täglichen Bewegungen ganz ohne ein Zuhörgerät verfolgen und sich selbst Ziele setzen.

Motiviert für brillantes Hören


Mein Wohlbefinden umfasst außerdem die Messung der „Tragezeit“ und „Unterhaltungen“. Dadurch erhält der/die TrägerIn mehr Transparenz über das eigene Trage- und Eingewöhnungsverhalten. Mit OVP 2.0 werden die Unterhaltungsanteile erfasst. So können TrägerInnen Rückschlüsse auf ihre sozialen Aktivitäten ziehen.



Ein Herz-Symbol führt zu den Mein Wohlbefinden Funktionen.

Die Mein Wohlbefinden Funktionen im Überblick

¹Larsen, R. T., Wagner, V., Korffitsen, C. B., Keller, C., Juhl, C. B., Langberg, H., & Christensen, J. (2022). Effectiveness of physical activity monitors in adults: systematic review and meta-analysis.
²Alessio, H. M., & Marron, K. H. (2014) Fitness and Better Hearing, Part 1. Hearing Review, 21(3): 18-24

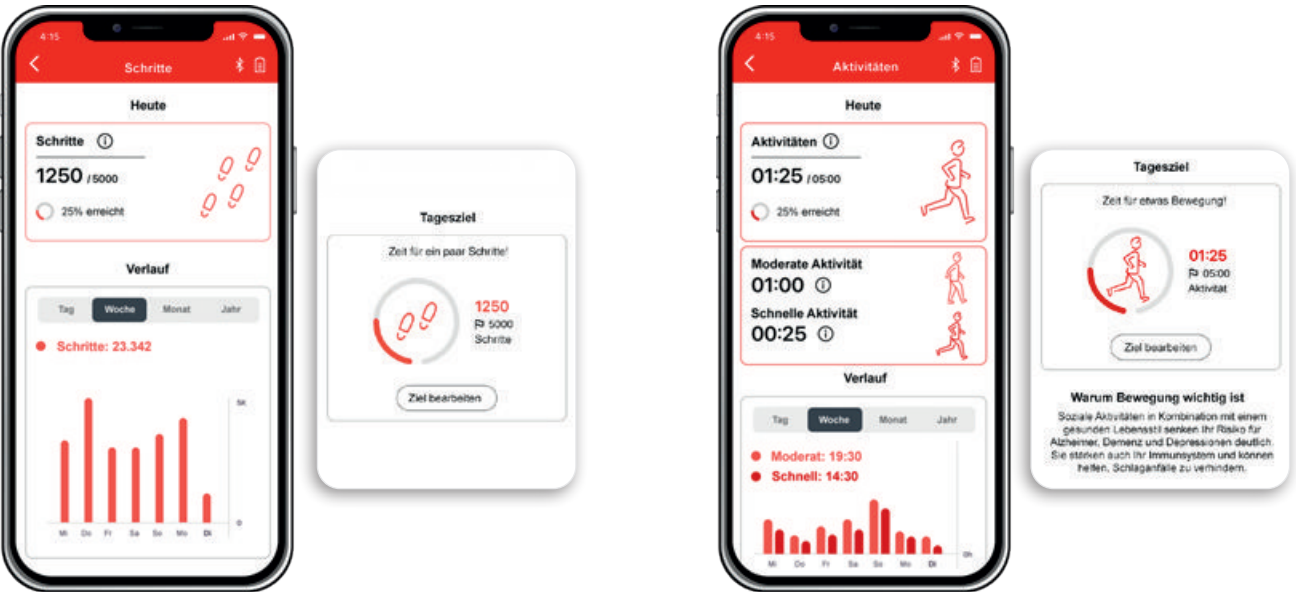


Schritte

Zusätzlich zur audiologischen Nutzung erfassen die Bewegungssensoren die Anzahl der Schritte. Dies trifft das Interesse vieler Menschen und fördert den Ehrgeiz zu mehr Bewegung. Und Schrittzähler am Handgelenk werden überflüssig. Ein weiterer Vorteil für Ihre KundInnen: Das Einstellen individueller Ziele.

Aktivitäten

„Aktivitäten“ umfasst drei Kategorien: Aktivitäten insgesamt, auf die sich auch das Tagesziel bezieht, sowie moderate Aktivität und schnelle Aktivität. Das voreingestellte Ziel, das jederzeit individuell angepasst werden kann, beruht auf Empfehlungen des U.S. Departments of Health and Human Services.

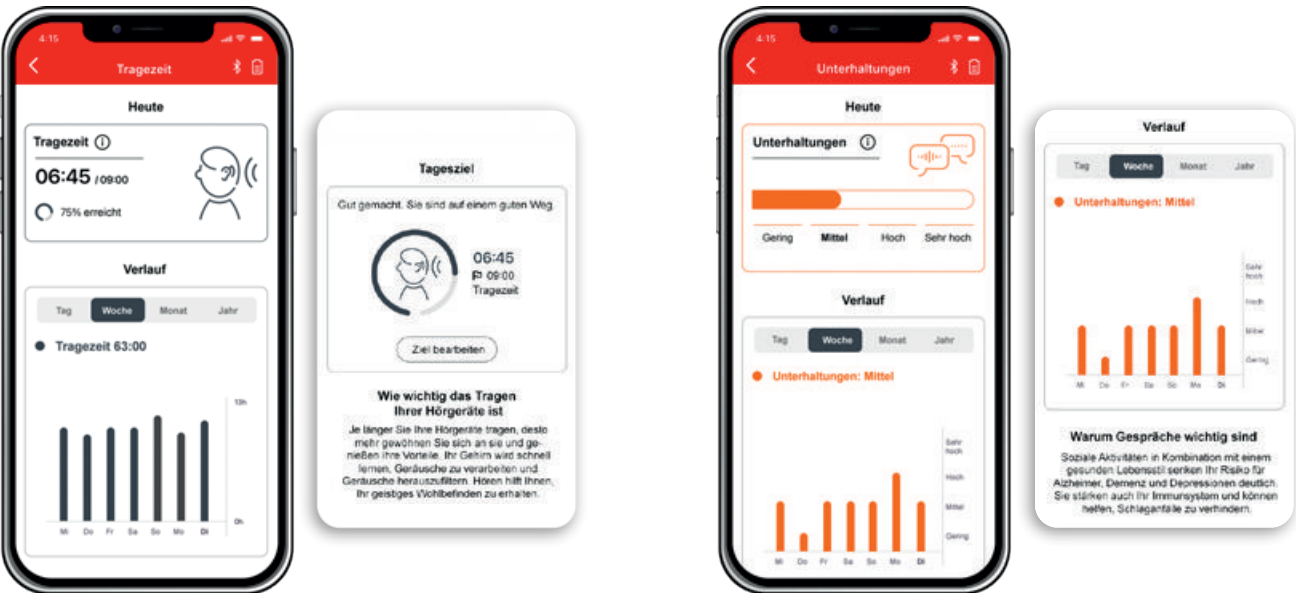

Tragezeit

Die Tragezeit ist eine bekannte Datengröße, die in Connexx bereits zur Verfügung steht. Nun haben auch HörgeräteträgerInnen selbst Zugriff darauf. Sprechen Sie eine Empfehlung für die optimale Tragezeit aus und legen Sie, falls gewünscht, das angestrebte Ziel gemeinsam in der Signia App fest.


Unterhaltungen

OVP 2.0 erfasst die eigene Sprachaktivität und damit den Anteil von Unterhaltungen im Tagesverlauf. Die These: Menschen, die ihr Gegenüber wieder verstehen, haben mehr Freude an Gesprächen und damit an sozialen Kontakten. Sie steigern ihre Kommunikationsaktivitäten und verbessern damit ihr Lebensgefühl.

EarWear 3.0

miniReceiver 3.0 – sicher und diskret.

Mit Pure Charge&Go AX haben wir eine neue Hörergeneration eingeführt: den miniReceiver 3.0. Durch die neue Biegung und den gänzlich veränderten Winkel, mit dem das Kabel aus dem Gehörgang tritt, sitzt der miniReceiver 3.0 noch diskreter und sicherer im Ohr. Die Voraussetzung für eine optimale Passform ist die genaue Bestimmung der individuell benötigten Länge.

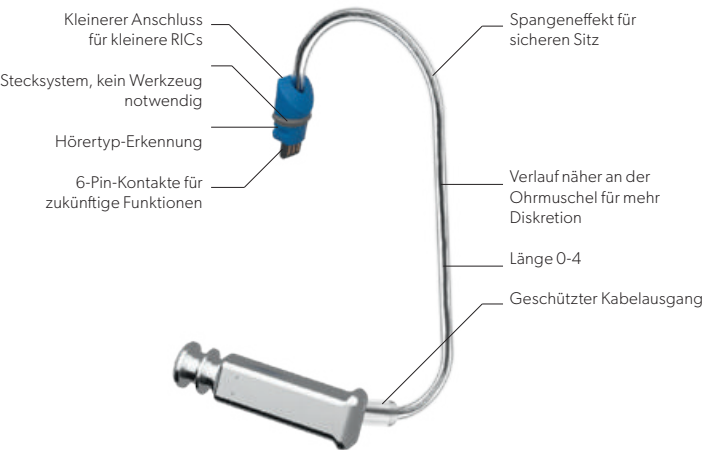

Noch diskreter
Ein Vorteil des miniReceivers 3.0 im Vergleich zu seinem Vorgänger ist ein deutlich diskreterer Verlauf. Das Kabel liegt jetzt noch näher an der Ohrmuschel an und verspricht einen noch besseren Sitz. Dies wurde durch eine neue Biegung und den gänzlich veränderten Winkel erzielt, mit dem das Kabel aus dem Gehörgang tritt.

Der Spangeneffekt
Ein weiterer, ganz wesentlicher Vorteil des miniReceivers 3.0 ist sein sicherer Sitz. Er spannt sich richtiggehend um die Ohrmuschel. Wie eine Spange sitzt er auch bei stärkeren Bewegungen sicher im Ohr.

Ist der neue Hörer kürzer?
Legt man die miniReceiver 2.0 und 3.0 mit gleicher Längenbezeichnung nebeneinander, scheint es so, als sei der neue Hörer zu kurz. Doch im Ohr verhält es sich meist anders. Unsere Praxistests haben ergeben, dass die Mehrzahl der KundInnen mit der gleichen Länge ideal versorgt ist. Ein Drittel der KundInnen benötigte eine kürzere Variante.

Wie messe ich richtig?
Die optimale Hörerlänge bestimmen Sie mit der neuen Messschablone 3.0. Setzen Sie die Schablone ans Ohr und lesen Sie die Ziffer ab, die dem abgebildeten Messpunkt am nächsten kommt. Der Messpunkt befindet sich an der Oberkante der Gehörgangsöffnung.



	S		M		P		HP ¹	
	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator
OSPL 90 (Peak)	110 dBSPL	120 dBSPL	119 dBSPL	129 dBSPL	122 dBSPL	131 dBSPL	131 dBSPL	138 dBSPL
FOG (Peak)	46 dB	57 dB	60 dB	70 dB	65 dB	75 dB	75 dB	83 dB

Abweichende Werte für Pure 312 AX (siehe Datenblatt in Connexx)

¹ Mit maßgefertigter CIC-Schale

EarWear 3.0

Eartips 3.0 und Sleeves 3.0

Die neuen Eartips 3.0 und Sleeves 3.0 sind in drei Formvarianten und vielen Größen erhältlich. Der Cerumenschutz wurde verbessert. Das Beste: Sie können für die neuen ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 genutzt werden. Die genauen Größenbezeichnungen finden Sie auf Seite 51.



Die neuen Eartips sind am inneren Ende weich, um ein komfortables Einsetzen und Tragegefühl zu erzielen.

Der neue Power Sleeve 3.0 ist eine vollständig geschlossene Variante.

Der Austausch ist für HöreräteträgerInnen wesentlich leichter durchzuführen als bei den Vorgängerprodukten. Die Hörgeräte halten trotzdem sicher.

Alle Eartips 3.0 und Sleeves 3.0 sind sowohl mit ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 einsetzbar. Das macht ihre Lagerhaltung um ein Vielfaches einfacher.

Um die Haltbarkeit weiter zu erhöhen und Schäden an Kabeln und Schläuchen zu reduzieren, verfügt der miniReceiver 3.0 über einen verstärkten Kabelausgang, während der ThinTube 3.0 aus einem Stück gefertigt ist. Ein Titanium-Shield auf allen miniReceivern 3.0 sorgt für eine antiallergische Oberfläche.

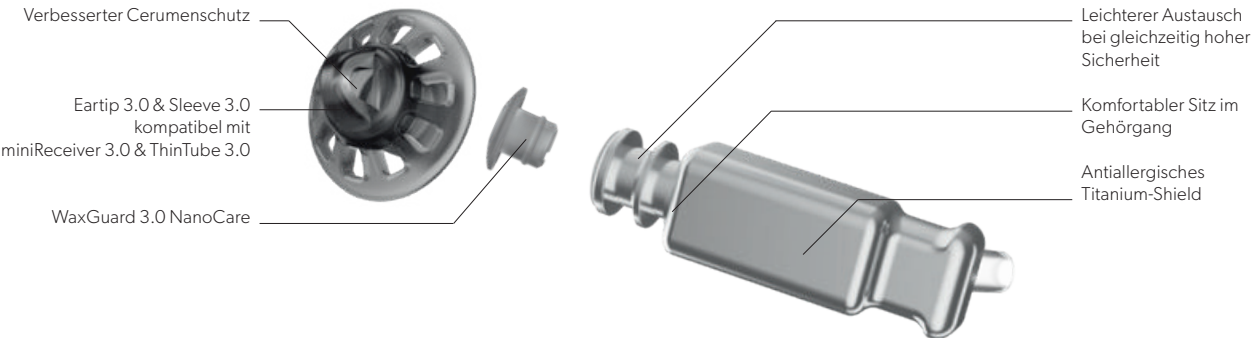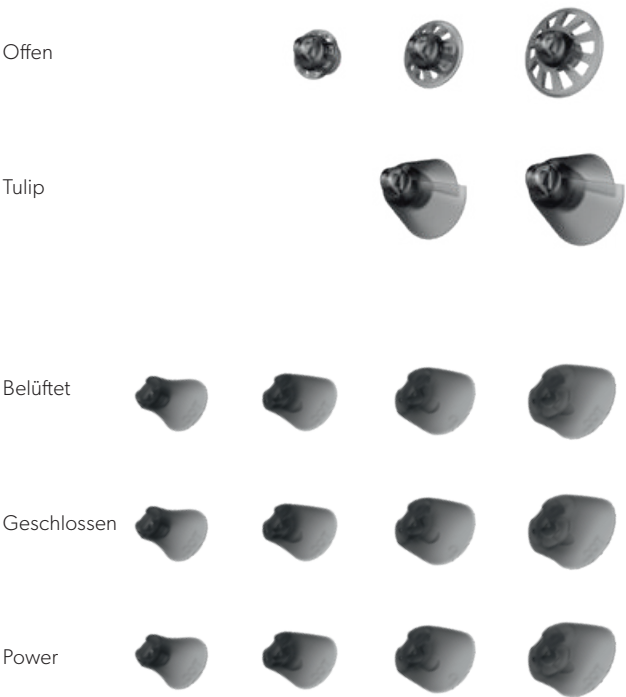

ThinTubes und Tips für HdOs bis Nx

ThinTubes für HdOs bis Nx	
	ThinTube (5 Stück): 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R, 5 seitenneutral
Tips für HdOs bis Nx	
	offener Tip (6 Stück): 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
	geschlossener Tip (6 Stück): 8 mm
	Double Tip (6 Stück): 8/10 mm, 10/12 mm

miniReceiver 2.0, Click Domes und Click Sleeves

miniReceiver 2.0			
	S: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R		P: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R
	M: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R		P und HP: P- und HP-miniReceiver sind mit maßgefertigter CIC-Schale bestellbar. HP-Hörer sind ausschließlich mit CIC-Schale erhältlich. Bitte IdO- oder Otoplastik-Bestellblock nutzen. Formulare unter: www.signia-pro.de/bestellformulare


Click Domes und Click Sleeves für RICs bis Xperience

	Click Dome, offen (6 Stück): 4 mm, 8 mm, 10 mm		Click Sleeve, belüftet: XS, S, M, L
	Click Dome, semi open (6 Stück): 8–12 mm		Click Sleeve, geschlossen: XS, S, M, L
	Dome, geschlossen (6 Stück): 6 mm, 8 mm, 10 mm	Cerumenfilter miniReceiver 2.0	
	Double Click Dome (6 Stück): 8/10 mm, 10/12 mm		miniReceiver 2.0 Cerumenfilter (8 Stück)

miniReceiver 3.0

miniReceiver 3.0			
	S: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R		P: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R
	M: OL, OR, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R		HP: Bitte bestellen Sie die miniReceiver-Größe HP mit passendem CIC-Gehäuse per IdO-Bestellformular: www.signia-pro.de/bestellformulare

ThinTubes 3.0

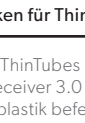ThinTubes 3.0 für Motion X		ThinTubes 3.0 Power für Motion X	
	ThinTube 3.0 ø 0,9 mm (Set rechts/links): S0, S1, S2, S3, S4		ThinTube 3.0 Power ø 1,4 mm (Set rechts/links): S0, S1, S2, S3, S4
	Concha Lock 3.0 (10 Stück)		Otoplastiken für ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 Die neuen ThinTubes 3.0 sind nicht mehr eingeklebt. ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 werden mit einer speziellen Halterung in der Otoplastik befestigt.

Eartips, Sleeves und Cerumenfilter 3.0

Eartips und Sleeves 3.0		Sleeves 3.0 geschlossen, belüftet und Power	
	Eartip 3.0, offen (6 Stück): 5 mm, 7 mm, 10 mm		Sleeve 3.0, geschlossen: XS, S, M, L
	Eartip 3.0, Tulip (6 Stück): 8 mm, 12 mm		Sleeve 3.0, belüftet (6 Stück): XS, S, M, L
			Sleeve 3.0, Power (6 Stück): XS, S, M, L

Cerumenfilter für ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0

	Wax Guard 3.0 NanoCare (8 Stück)
---	----------------------------------

Für miniReceiver 3.0 und ThinTubes 3.0

Unity 3

Unity 3 ist ein innovatives PC-basiertes Mess- und Anpasssystem, das Ihre täglichen Arbeitsschritte vereinfacht und beschleunigt, ohne dabei auf höchste technische Ansprüche zu verzichten.

Bis
16 kHz!

Modulare Hard- und Software-Komponenten bieten Ihnen außergewöhnliche Flexibilität für Ihre persönlichen Anforderungen. Eine übersichtliche visuelle Darstellung für einen einfachen Messvorgang und die individuelle Workflow-Unterstützung helfen Ihnen, Ihren Arbeitsablauf so zu gestalten, wie Sie es möchten.

Hoher Komfort

- Eine individuell konfigurierbare Software für alle Unity-Komponenten orientiert sich am typischen Workflow und dem Anpassprozess von HörakustikerInnen.
- Die binauralen Module InSitu und Speechmapping ersparen Ihnen und Ihren KundInnen durch gleichzeitige Messung beider Ohren viel Zeit im Anpassprozess.
- Durch die Unterstützung von AutoFit passen Sie die Hörgeräte schnell und einfach an die Zielkurve an.
- Das InSitu-Live-Monitoring ermöglicht eine noch individuellere Anpassung.
- Einfache Software-Updates und -Upgrades sind via Update Manager möglich.
- Die Unity 3 Software ist kompatibel mit NOAH, kann aber auch stand-alone betrieben werden.

Raffiniertes Design

- Die Kalibrierung wird direkt in den jeweiligen Wandlern gespeichert, die bereits kalibriert geliefert werden.
- Unity 3 ist modular aufgebaut: Verwenden Sie das Audiometer und die Messbox separat oder hängen Sie das Audiometer platzsparend an die Messbox. Selbstverständlich ist eine Kabelblende hierfür im Lieferumfang enthalten.
- Die leichtgewichtige Fitting-Unit kann direkt über einen USB-Anschluss betrieben werden – optimal für Hausbesuche.

Weitere Informationen und Videos zu Unity 3 finden Sie in unserem Be Brilliant Lab – immer auf dem Laufenden bleiben, Lernen, Trainieren und Quizzen:
www.signia-pro.com/be-brilliant-lab



HIT-Unit (Messbox)

Durchdachtes modulares Konzept: Die Fitting-Unit kann platzsparend an die HIT-Unit eingehängt und mit einer Kabelblende versehen werden.

Messbox – formvollendete Technik

Das optimierte Gehäusedesign ermöglicht Ihnen nicht nur einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Messkammer – clevere Details, wie beispielsweise eine integrierte Buchse zur Durchleitung des Programmierkabels, machen die Arbeit mit der HIT-Unit sogar richtig komfortabel. Die HIT-Unit kann unabhängig vom Audiometer betrieben werden – über das mitgelieferte Netzteil oder direkt über den USB-Anschluss. Zudem besteht die Möglichkeit, das Speechmapping-Modul für die Messung über Kuppler zu verwenden.

Audiometer – effiziente Diagnostik

Das Zwei-Kanal-Audiometer mit integrierter Soundkarte bietet Ihnen eine Vielfalt an diagnostischen Möglichkeiten. Das Audiometer-Modul bietet viele Testverfahren sowie Hochfrequenzaudiometrie bis zu 16 kHz und lässt sich ganz einfach per Tastatur und Maus steuern. Es können mehrere Kurven gleichzeitig, beispielsweise Hörtests aus verschiedenen Sitzungen, in einem Diagramm angezeigt werden. So können Sie Ergebnisse sehr gut vergleichen und Veränderungen analysieren. In der Sprachaudiometrie wird für jedes Wort abgespeichert, ob es richtig oder falsch verstanden wurde. Die Ergebnisse lassen sich bei Bedarf jederzeit abrufen.

InSitu – präzise Anpassung

Simultane binaurale Messung und InSitu-Live-Monitoring – das gehört zu den vielen ausgezeichneten Features der Unity 3. Unity 3 bietet mit dem InSitu- und dem Speechmapping-Modul eine gleichzeitige Messung beider Ohren und spart Ihnen und Ihren KundInnen damit viel Zeit bei der Anpassung. Durch die Unterstützung von AutoFit und InSitu-Live-Monitoring ermöglicht Unity 3 Anpassung auf herausragendem Niveau. Das InSitu-Live-Monitoring erlaubt es, den Schall direkt im Gehörgang aufzunehmen und über einen Kopfhörer auch für HörakustikerInnen hörbar zu machen.

Speechmapping – hervorragende Visualisierung

Ob Sie Ihre Anpassung überprüfen oder ihr einfach nur den letzten Schliff geben möchten – mit Speechmapping und Perzentilanalyse stehen Ihnen alle Optionen offen. Zudem helfen Ihnen zahlreiche Geräuschbeispiele auch dabei, Ihren KundInnen die Unterschiede zwischen verschiedenen Leistungsklassen und Features live zu visualisieren.



HIT-Unit (Messbox)



Fitting-Unit



InSitu-Mikrofone

Unterstützte Normen

- IEC 60118-7
- IEC 60118-15 (in Kombination mit dem Speechmapping-Modul)
- ANSI S3.22

Fitting-Unit

Die intelligente Fitting-Unit bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, erkennt die angeschlossenen Wandler automatisch und besitzt zudem eine integrierte Soundkarte.

Viele praktische Details, wie eine Steckverbindung für die Lautsprecher oder ein optischer Ausgang, machen die Unity 3 Fitting-Unit zu einem hervorragenden Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

iScan II

Mit iScan II arbeiten Sie mit neuester hochauflösender Technologie sowie der bewährten und beliebten iScan Software. Der große Scanraum bietet komfortables Arbeiten. Die Kompatibilität mit NOAH ermöglicht den Einsatz im bekannten Workflow. Das enge Zusammenspiel mit eBusiness erlaubt die Bestellung individueller Im-Ohr-Lösungen mit wenigen Klicks.

- Zeit pro Scan: 60 – 70 s
- Auflösung < 20 µm (einstellbar)
- Keine regelmäßige Kalibrierung notwendig
- Großer Scanraum (einfach zu handhaben)
- Geeignet für alle Abdruckmaterialien (außer transparent)
- ASCII- und STL-unverschlüsselt
- NOAH und Connexx-Datenbank (stand-alone)
- Plug-and-Play-Installation
- Bewährte und beliebte iScan Software



Direkte Bestellung über eBusiness:

- Der digitale Versand der Abdruckdaten spart Porto und verhindert Transportschäden und Verformungen, die auf dem Postweg entstehen könnten.
- Sie verringern die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung um bis zu 48 Stunden und erhöhen damit die Zufriedenheit Ihrer KundInnen.
- Sie können den Status Ihrer Bestellung mithilfe von eBusiness jederzeit online nachverfolgen.
- Es können nur Optionen gewählt werden, die für die gewünschte Bauform zur Verfügung stehen.

Programmierzubehör

Programmier-Interfaces für Connexx	
	NoahLink Wireless: Für die professionelle Anpassung von Bluetooth-fähigen Hörgeräten
	HI-Pro 2 USB PC-Interface: Anschluss der HI-Pro 2 über den USB-Anschluss am PC

Reinigungs- und Pflegemittel

Bieten Sie Ihren KundInnen nicht nur Hörgeräte und Zubehör der Marke Signia, sondern auch hochwertige Pflegeprodukte – alles aus einer Hand.

Signia Reinigungs- und Pflegemittel	
	Starter Kit Basic (Tasche, 3 Reinigungstücher, Reinigungsspray, 1 Trockenkapsel, Trockenbecher)
	Multi Tool (Bürste, Schlinge, Magnet, Ventbürste)
	Reinigungsspray mit Bürste (30 ml)
	Reinigungstücher (30 Stück – separat verpackt)
	Trockenkapseln (4 Stück)
	Trockenbecher
	Reinigungstabletten (20 Stück – 5 Packungen à 4 Stück)
	Reinigungsbecher
	Puster

Elektrische Signia Reinigungs- und Trockengeräte	
	PerfectDry Lux (elektrische Trocknung und UV-Licht)
	PerfectClean (elektrisches Reinigungsgerät mit Flüssigkeit)
	Nachfüllkartusche Perfect Clean (30 ml)

Immer auf dem Laufenden

Newsletter

Mit dem Signia Newsletter erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen für Ihre tägliche Arbeit. Die Themen umfassen Produkte, Kampagnen für Ihr eigenes Marketing und Einladungen zu Online- und Präsenzveranstaltungen. Es lohnt sich in jedem Fall, diese zuverlässige Informationsquelle zu nutzen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Die News sind stets aktuell. Wir informieren Sie mit maximalem Informationsgehalt und höchster Transparenz. Zudem wechseln die Themen nach Aktualität und Bedarf.

Unsere Produktthemen umfassen vielfältige Bereiche:

- Neuentwickelte Produkte
- Produktverbesserungen
- Frisch eingetroffene HMV-Nummern
- Vorankündigung von Ausphasungen
- Wöchentliche Information zur aktuellen Lieferfähigkeit
- Praktische audiologische Anpasstipps
- Neueste Produktbroschüren und Arbeitsmaterial

- Termine für die Weiterbildung zum Hörakustiker für teleaudiologische Anwendungen
- Kostenlose Verkaufstrainings aus Praxissicht
- Digitale Keynotes zum Launch
- Einladung zu Virtuellen Coffee Breaks mit unseren Kollegen aus dem Vertrieb
- Interessante Podcasts


Unsere Marketingthemen:

- Innovative Kampagnen
- Hilfreiche Tipps zur Umsetzung in Ihrem Fachgeschäft
- Aufmerksamkeitsstarkes POS-Marketingmaterial für Ihr Fachgeschäft
- Neueste B2C-Broschüren zur Verkaufsunterstützung

Trainings- und Eventinformationen:


- Themen und Termine zu Online-Produktschulungen von ExpertInnen
- Einladungen zu hochwertigen Präsenzs Schulungen
- 24/7 Wissensvermittlung rund ums Hören im Be-Brilliant-Lab

Zur Anmeldung

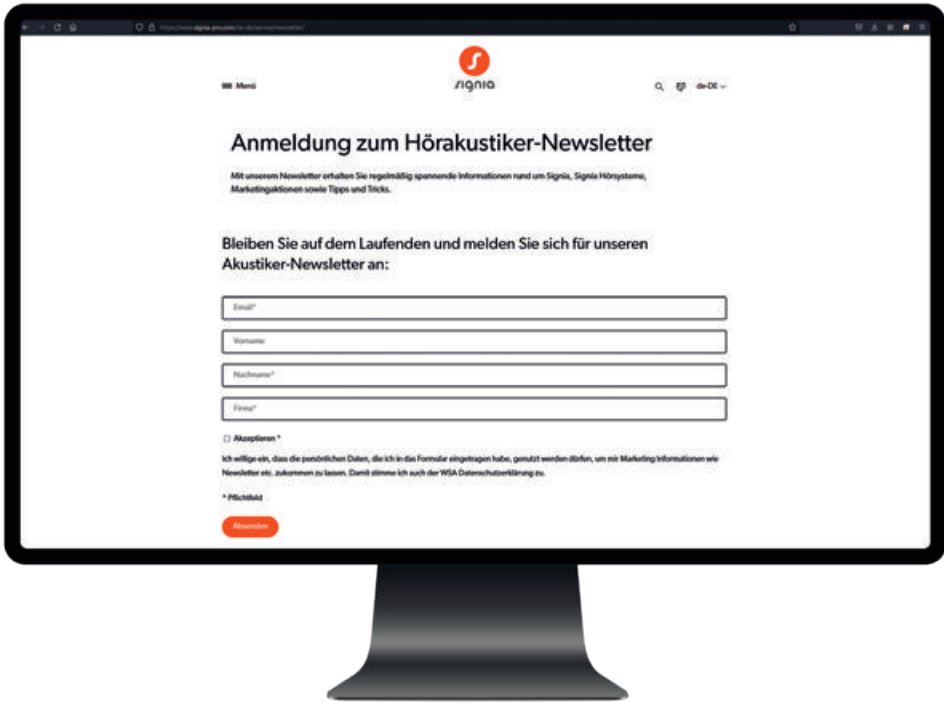

Heute lernen wir anders

Be Brilliant Lab

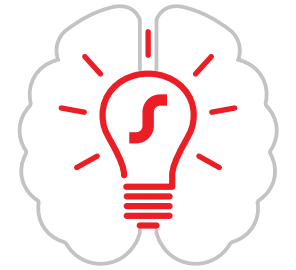

Be Brilliant Lab

Wer sich auf eine Prüfung vorbereitet oder einfach nur sein Wissen auffrischen möchte, braucht längst keine dicken Nachschlagewerke mehr. Lernen, quizzern, vernetzen – all das geht in der Hörakustik auch digital. Mit diesem bunten Angebot bietet das Be Brilliant Lab weit mehr als Wissensvermittlung. Es geht vor allem um eins: den Spaß an der Welt des Hörens.

Die deutschlandweit einzigartige digitale Plattform der Hörakustik, „Be Brilliant Lab“ von Signia, vermittelt nicht nur gesammeltes Wissen, sondern bietet auch Entertainment und Gewinnspiele. Und vernetzt HörakustikerInnen aus ganz Deutschland zu einer Community, zu der mittlerweile 5000 aktive UserInnen gehören. Nehmen Sie an Quizduellen mit KollegInnen oder virtuellen Bots teil. Die Themen reichen von Messtechnik bis Anatomie.

Seit Kurzem gibt es im Be Brilliant Lab auch ein Angebot an „Blended Learning“-Kursen von Signia – ein hybrides Schulungskonzept mit einer Kombination aus Online- und Präsenzunterricht.

Hier geht's zum
Be Brilliant Lab



Maßgeschneiderte Module

Signia Online Trainings

Sie möchten Informationen für Ihre tägliche Arbeit zeitsparend und effektiv erhalten? Eine hervorragende Möglichkeit bieten die Online Trainings von Signia. Die Inhalte sind vom Basismodul über ein Aufbaumodul bis zum Expertenmodul gestaltet.

Es werden verschiedene wichtige Praxisthemen behandelt, je nach Kenntnisstand der TeilnehmerInnen. Sie bauen nützliches Wissen auf, das von unseren ExpertInnen optimal aufbereitet wurde und online persönlich vorgestellt wird. Die folgenden Themenbereiche bieten wir derzeit an:

- Connexx
- Insio Charge&Go AX
- Hörgeräteanpassung am Limit
- Zubehör
- TeleCare
- Beratung und Verkauf
- Künstliche Intelligenz
- Tinnitus

Melden Sie sich für Ihren Wunschtermin auf unserer Homepage für HörakustikerInnen online an, um sich Ihren Platz zu sichern.

Infos und Anmeldung



Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen ihren TrägerInnen, mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

Signia. Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.



„Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an das iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple ist weder für die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts verantwortlich noch dafür, dass es Sicherheitsstandards oder gesetzliche Vorschriften erfüllt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Das „Qi“-Symbol ist ein eingetragenes Warenzeichen des Wireless Power Consortium.

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Tel.: 09131 308-3333

10244299 | Gedruckt in Deutschland
© 09.2022 Signia GmbH

Sie finden uns unter:



signia-pro.com



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/SigniaHearing